

CONSERVA
LOS RECUERDOS
Y NO LAS CICATRICES



Prosil® silicona de alta pureza de grado médico para prevenir y tratar cicatrices hipertróficas y queloides.

Modo de uso

- Limpie y seque la zona a tratar antes de la aplicación.
- Aplique una cantidad abundante de PROSIL sobre toda la cicatriz.
- Repita la aplicación cada 8 horas durante 8 a 12 semanas.

Epi-Derm® es una lámina de gel de silicona indicada para atenuar y prevenir la formación de cicatrices hipertróficas y queloides, como resultado de una quemadura, lesión traumática o quirúrgica, ya sean recientes o antiguas.

Modo de uso

- Quitar el film plástico que cubre la lámina Epi-Derm.
- Cubrir completamente la cicatriz y extender alrededor de 0,5 cm a 1 cm, por toda su periferia.
- El tiempo de uso mínimo es de 12 hrs. al día, siendo ideal usarlo las 24hrs. Se debe retirar la lámina cada 12 hrs. para lavar la cicatriz y la lámina con agua levemente jabonosa.

Xeraget® es un gel de silicona para el tratamiento y prevención de cicatrices hipertróficas y queloides. Puede ser aplicado con éxito en zonas corporales de pliegues, cóncavas expuestas.

Modo de uso

- Aplicar una cantidad suficiente sobre la cicatriz.
- Remover Xeraget cada 12 horas y lavar la zona con agua y jabón suave, enjuagar, secar y reaplicar.
- Xeraget puede ser utilizado alternadamente con Epi-Derm. Durante el día Xeraget y durante la noche Epi-Derm.

Evitar el contacto con los ojos. Déjese de usar en caso de erupción o reacción alérgica.



*Amado Ruiz-Razura, MD, FACS, FICS; Christopher K. Patronella, MD, FACS, FICS; German Newall, MD, FACS, FICS; Henry A. Mentz, MD, FACS, FICS; Patricia Orozco, MD. Eficacia Clínica de un Aplicador en barra versus láminas tradicionales de polidimetilsilicona tópica para reducir las cicatrices hipertróficas y queloides. Centro Estético para Cirugía Plástica Houston, Texas, USA.